


Misurazione del Lattato:

- Per un fisico in buona forma, per il proprio benessere o in preparazione di un evento sportivo: Solamente attraverso un allenamento mirato è possibile raggiungere un vero successo!
- Il livello ottimale d'allenamento sotto sforzo di ciascun atleta può essere determinato solamente attraverso la misurazione del lattato nel sangue.
- Sforzi eccessivi durante gli allenamenti possono essere evitati per tempo.
- Per ottenere un incremento delle proprie performance, un ottimo catabolismo dei grassi, ed un'attività bilanciata attraverso il controllo del proprio allenamento.

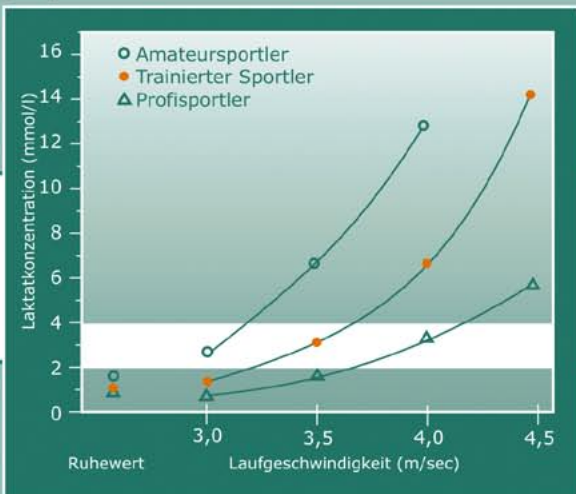

Prodotti & accessori:

Lactate Scout SOLO

Strumento tascabile Lactate-Scout, 2x AAA/LR03 batterie, manuale d'istruzioni

Lactate Scout BASIC Set

Strumento tascabile Lactate-Scout, 2x AAA/LR03 batterie, marsupio alla cintura, soluzione di controllo, manuale d'istruzioni

Lactate Scout START Set

Strumento tascabile Lactate-Scout, 2x AAA/LR03 batterie, marsupio alla cintura per Lactate-Scout, penna per digitopuntura, 30 lancette, 30 salviette imbevute di sostanza disinfettante, soluzione di controllo, 6 strisce reattive, manuale d'istruzioni con poster, CD-ROM

Big Pack 24+

24 strisce reattive, 30 lancette, 30 salviette disinfettante

- **Big Pack 48+** (48 strisce reattive, soluzione di contr.)
- **Big Pack 72+** (72 strisce reattive)
- **PC Pack USB / Bluetooth**
Analisi tramite software „Lactate Scout Assistant“ che comprende cavo per uso medico approvato per l'utilizzo su PC

(Le offerte sono soggette ad eventuali cambiamenti, i diritti per offerte alternative sono riservati. Tutti i clienti sono tenuti a rispettare le condizioni di EKF diagnostic sales GmbH)

Ulteriori informazioni, offerte e la lista dei distributori al seguente indirizzo Internet:
www.lactatescout.com

Distribuzione:



Distribuzione:

EKF - diagnostic sales GmbH
Ebendorfer Chaussee 3
D-39179 Barleben/Magdeburg

Tel. +49(0)39203-785-0
Fax +49(0)39203-785-24
www.EKF-diagnostic.de



Produttore:

SensLab GmbH
a Member of EKF - Group
Bautzner Str. 67
D - 04347 Leipzig

Tel. +49(0)341-2341841
Fax +49(0)341-2341840
www.senslab.de



LACTATE SCOUT

**Performance
sotto controllo**




Lactate SCOUT

- Ideale per un allenamento efficace!
- Facile da utilizzare grazie alle pratiche strisce reattive e rotella multifunzione
- Una goccia di sangue 0,5 µl e sufficiente
- Risultati precisi in soli 15 sec.
- Range di misurazione: 0,5 - 25,0 mmol/l
- Variazione: 3 -8% (secondo concentrat.)
- Memorizza fino a 250 misurazioni, PC interfaccia e programmi individuali

Misurazione facile e veloce:

- Estrarre una striscia reattiva dalla confezione ed inserirla nel Lactate Scout
- Pulire, disinfettare ed asciugare il lobo dell'orecchio o il dito di una mano
- Effettuare il prelievo di sangue
- Accostare la striscia reattiva alla goccia di sangue ottenuta
- A questo punto saranno assorbiti 0.5 µl e la misurazione partirà automaticamente
- Dopo 15 secondi il valore apparirà sul display e sarà registrato
- Molteplici opzioni per effettuare il test, possibilità di analizzare i risultati su PC

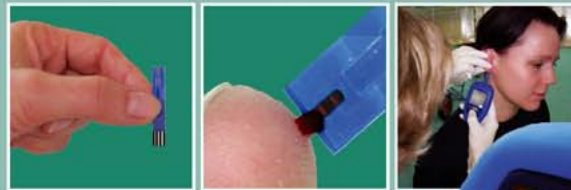

Può essere utilizzato ovunque:

- in fisioterapia e riabilitazione
- nelle palestre, società sportive, centri fitness e nel monitoraggio dell'allenamento individuale
- nell'allenamento individuale e di squadra, sia a livello agonistico che amatoriale
- come un duttile e conveniente strumento di complemento alle analisi di laboratorio
- può essere utilizzato da chiunque, è comodo e semplice nell'uso
- accreditato come medical device secondo la direttiva Europea IVD

LACTATE SCOUT

- Misurazione professionale del Lattato in modo facile e veloce!
- Basato su diagnosi metabolica per ottenere ottime performance!
- Un'analisi efficiente ed intelligente per atleti professionisti ed amatori!
- Un compagno di lavoro ideale in medicina sportiva!

